

Power Rec SS 使用上の注意点

■ PowerRecSS (以下SS)のACプラグ抜き差しに関する注意点は次の通りです。

- ・ SSに接続済みのACアダプタを電源コンセントにつなぐと、起動が始まります。
しばらく後、前面のLAYOUT LEDが全点灯→全消灯で準備完了です。
- ・ 準備が完了するまでの間、誤って電源を落とさないようにご注意ください。
- ・ SSの電源アダプタをコンセントから抜く際は、必ずSS本体前面の[Power]ボタンで本体電源をOFFしてから抜いてください。

■ PowerRecSS (以下SS) と PC とのUSB接続に関する注意点は次の通りです。

- ・ PCとの接続は、SSからPCへのデータのコピー(転送)のみを目的とするものです。
- ・ PCからSSを取り外す際には次の手順に従って下さい。
 - a) タスクバーに表示される[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリック
 - b) [PowerRec SS USB DEVICE の取り出し]を選択する
 - c) 取り外し可能とのメッセージが表示されてからUSBケーブルを抜く
- ・ SS内の収録データは、なるべくPCから削除を行なわないで下さい。

※ SS内からPC経由で収録データを削除した場合は、必ず直後にPCからSSを取り外し
SS本体の電源OFF、電源ONで再起動を実施してからご利用ください。

- ・ SS内の収録データを消去する場合は、SSの本体操作での削除を推奨致します。